

Pannenweg 200
6031 RK Nederweert
Tel: 0495-461236
lab@merefelt.com

Begeleidend formulier onderzoeksmateriaal Speeksel

Eigenaar: _____

UBNnummer: _____

Adres: _____

Woonplaats: _____

E.mail: _____

Behandelend dierenarts: _____

Diersoort: Varken

Materiaal: Speeksel

Datum monstername: _____

Aangevraagd PCR onderzoek: Circo PCV2

Influenza A

PRRS

RESPIG JA / NEE
(doorstrepen wat niet van toepassing is)

A. pleuropneumoniae

H. parasuis

M. hyopneumoniae

M. hyorhinis

B. bronchiseptica

P. multocida

P. multocida toxine

Veterinair toezichtsnummer Merefelt Livestock Diagnostics: 209049

Ophaaldienst Miedema (Veterinair toezichtsnummer EG nummer: EG207256)

Datum opgehaald: _____


Handtekening: _____

Speeksel onderzoek

Materiaal voor speekselonderzoek te verkrijgen via laboratorium.

Werkwijze + Interpretatie van de resultaten:

De bevolkingskeuring en het verzamelen van monsters van orale vloeistoffen is nooit zo gemakkelijk – en veilig – geweest

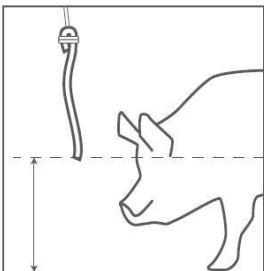


1. Hang een touw in het hok boven de grond, op schouderhoogte van de varkens. Verzekert U van, dat het touw stevig vastgemaakt is.



2. Laat de varkens gedurende 15 tot 30 minuten aan het touw kauwen. Draag een eerste paar handschoenen, verwijder het touw uit het hok, en plaats het in de grote reine individuele zak.



3. Snij het touw los van de streng die U gebruikt heeft om het touw op te hangen, en sluit de bovenzijde van de zak. Pers het touw uit in de zak, om het vocht uit het doorweekte touw te extraheren.

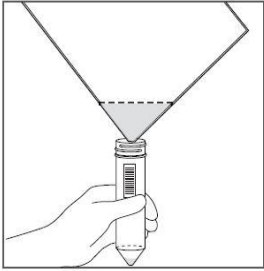

4. Gebruik een tweede paar handschoenen, en scheur de hoek van de zak af op de perforaties. Giet de vloeibare inhoud in de proefbuis, en sluit de dop.



5. Plaats de proefbuis in de kleinere zak, en sluit af. Plaats de kleinere zak in het grote vak van de dubbele tas. Voeg het aanvraagformulier voor de laboratoriumtest in het bijgaande vak. Zend de proefbuis gekoeld naar het testlaboratorium.

Bronvermelding:

ITL Animal Health Care